



DESCRIÇÃO: CLEARLENS Solução Conservadora tem ação de desinfetar e conservar as lentes de contato sem irritar os olhos. Elimina micro-organismos prejudiciais da superfície da lente. Lubrifica as lentes antes do uso. Proporciona um conforto prolongado durante todo o dia, mesmo para olhos sensíveis. Lubrifica as lentes e alivia pequenas irritações e o desconforto durante o uso das lentes. Para todos os tipos de lentes Hidrofílicas (gelatinosas), Silicone-Hidrogel e RGP (rígida gás permeável). Não contém clorexidina nem tiomersal. **COMPOSIÇÃO:** Solução isotônica, tamponada e estéril contendo EDTA, Fosfatos, Cloreto de Sódio, Citrato de Sódio, Glicerol, Ácido Hialurônico (Hialuronato de Sódio) e PHMB 0,00013% (conservante). **INDICAÇÕES:** CLEARLENS Solução Conservadora é indicada para desinfecção, conservação diária, lubrificação, enxágue e armazenamento de todas as lentes de contato gelatinosas (hidrofílicas), silicone hidrogel e RGP (rígida gás permeável). **INSTRUÇÕES PARA LIMPAR E DESINFETAR:**

1º passo - As mãos: Sempre lavar e enxaguar suas mãos antes de manusear suas lentes de contato. **2º passo** - Limpeza e fricção: Acomode a lente na palma da mão. Enxágue completamente os dois lados da lente com CLEARLENS Solução Limpadora se suas lentes são RGP (rígida gás permeável) ou CLEARLENS Solução Multiuso se suas lentes forem gelatinosas ou silicone hidrogel, e, com o dedo indicador da outra mão, friccione-a cuidadosamente de maneira linear (para frente e para trás e também para ambos os lados, em forma de cruz). Este procedimento deverá ser efetuado em ambos os lados da lente. Evite tocar a lente com a unha a fim de evitar a possibilidade de rasgos ou danos à mesma. **3º passo** - Enxágue, desinfecção e conservação: Enxágue suas lentes limpas novamente, desta vez com CLEARLENS Solução Conservadora, retirando totalmente a solução aplicada no passo anterior. Coloque as lentes limpas no estojo e encha-o com CLEARLENS Solução Conservadora. Deixe as lentes imersas durante, no mínimo, quatro (4) horas. A solução utilizada para desinfecção e acondicionamento deverá ser descartada diariamente. Para reutilizar as lentes, retire-as do estojo, repita o 1º passo e coloque-as nos olhos. Não é necessário enxaguá-las antes da utilização. **4º passo** - Cuidados com o estojo: a) Quando utilizar um novo estojo para lentes, enxaguá-lo com CLEARLENS Solução Conservadora antes de usá-lo, para eliminar qualquer resíduo. b) Após o uso, sempre esvaziar o estojo para lentes, e enxaguá-lo com CLEARLENS Solução Conservadora. c) Enxágue bem o estojo a ser utilizado para o armazenamento das lentes com CLEARLENS Solução Conservadora e encha-o com esta solução após completar o enxágue. A cavidade do estojo deve permanecer com solução abaixo de sua borda para evitar que a lente, ao flutuar, seja danificada pela tampa do estojo. Seu especialista pode recomendar produtos adicionais ou procedimentos para cuidar de suas lentes com base na química de suas lágrimas e seu horário de uso das lentes. **AVERTÊNCIAS:** Siga rigorosamente as instruções de seu especialista e todas as instruções de uso deste produto para o uso e conservação corretos de suas lentes de contato, e dos acessórios que se usam para seu cuidado, incluindo o estojo. Se você sentir um desconforto persistente nos olhos, lacrimejamento excessivo, distúrbios na visão ou vermelhidão, retire IMEDIATAMENTE as lentes e consulte seu oftalmologista.

PRECAUÇÕES: Conservar em temperatura ambiente. Evitar calor excessivo. Manter o frasco bem fechado quando não estiver sendo utilizado. Respeitar a data de validade marcada no produto. Manter fora do alcance das crianças. Não usar para desinfecção térmica. Descartar o restante da solução após quatro meses da abertura do frasco. Para evitar contaminação do produto não tocar a superfície do conta-gotas. Sempre usar uma solução nova de CLEARLENS Solução Conservadora. Não reutilizar a solução do seu estojo para lentes. Não usar esta solução se for alérgico a qualquer um dos componentes de CLEARLENS Solução Conservadora. As lentes podem ser armazenadas em seu estojo fechado por um período máximo de 30 dias. Se você precisar armazenar suas lentes por um período mais longo de tempo, limpe-as da forma recomendada e desinfete-as com CLEARLENS Solução Conservadora a cada 30 dias e também cada vez que for usá-las. Importante: Se ocorrer irritação ou lacrimejamento excessivo e estes sintomas persistirem ou se agravarem, ou ainda, se sua visão ficar embaçada, interrompa o uso da solução e procure um especialista. **CONTRAINDICAÇÕES:** Pessoas alérgicas a qualquer um dos componentes de CLEARLENS Solução Conservadora não devem utilizar este produto. **APRESENTAÇÕES:** CLEARLENS Solução Conservadora é esterilizado por filtração e apresentado em frascos plásticos de 60 mL, 120 mL e 300 mL. **PRODUTO ESTÉRIL.**

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE: O armazenamento e o transporte devem ser feitos à temperatura ambiente, entre 15 e 30 °C. o produto deve ser protegido da luz solar e não deve ser congelado. Prazo de validade: 24 meses após fabricação. Fabricado por: **LEBON PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS LTDA.** Av. Ricardo Leônidas Ribas, 439|Distrito Industrial | CEP 91790-005| Porto Alegre | RS | Responsável Técnico: José Rosito Filho | CRF/RS 713 | Registro ANVISA nº 80256510004 | CNPJ: 87.375.952/0001-78 | INDÚSTRIA BRASILEIRA