



**DESCRIÇÃO:** CLEARLENS Solução Limpadora tem ação de limpar, desinfetar, remover acúmulos de proteínas e outros depósitos da superfície das lentes RGP (Rígida Gás Permeável). CLEARLENS Solução Limpadora elimina micro-organismos prejudiciais da superfície da lente. CLEARLENS Solução Limpadora proporciona uma limpeza profunda eliminando todos os depósitos da superfície das lentes. CLEARLENS Solução Limpadora para todos os tipos de lentes RGP (Rígida Gás Permeável). Não contém tiomersal. **COMPOSIÇÃO:** Solução isotônica, tamponada e estéril contendo EDTA, Fosfatos, Cloreto de Sódio, Citrato de Sódio, Poloxâmer (tensoativo não iônico), Polissorbato (tensoativo não iônico), Cocoamidopropilbetaina (tensoativo não iônico), PHMB 0,0005% (conservante) e Digliconato de Clorexidina 0,0003% (conservante). **INDICAÇÕES:** CLEARLENS Solução Limpadora é indicada para limpeza profunda diária, desinfecção e remoção de proteínas de todas as lentes de contato RGP (Rígidas Gás Permeáveis). **INSTRUÇÕES PARA LIMPAR, DESINFETAR E REMOVER PROTEÍNAS: 1º passo** - As mãos: Sempre lavar e enxaguar suas mãos antes de manusear suas lentes de contato. **2º passo** - Limpeza, fricção e desinfecção: Acomode a lente na palma da mão. Enxágue completamente os dois lados da lente com CLEARLENS Solução Limpadora e, com o dedo indicador da outra mão, fricione-a cuidadosamente de maneira linear (para frente e para trás e também para ambos os lados, em forma de cruz). Este procedimento deverá ser efetuado em ambos os lados da lente. Para completa desinfecção, deixe as lentes imersas durante, no mínimo, quatro (4) horas em CLEARLENS Solução Limpadora. **3º passo** - Enxágue e conservação: Enxágue bem a lente de contato, utilizando CLEARLENS Solução Conservadora para retirar totalmente a solução limpadora. Coloque as lentes limpas no estojo e encha-o com CLEARLENS Solução Conservadora. A solução utilizada para acondicionamento deverá ser descartada diariamente. Para reutilizar as lentes, retire-as do estojo, repita o 1º passo e coloque-as nos olhos. Não é necessário enxaguá-las antes da utilização. **4º passo** - Cuidados com o estojo: a) Quando utilizar um novo estojo para lentes, enxaguá-lo com CLEARLENS Solução Conservadora antes do uso, para eliminar qualquer resíduo. b) Após o uso, sempre esvaziar o estojo para lentes, e enxaguá-lo com CLEARLENS Solução Conservadora. c) Enxágue bem o estojo a ser utilizado para o armazenamento das lentes com CLEARLENS Solução Conservadora e encha-o com esta solução após completar o enxágue. A cavidade do estojo deve permanecer com solução abaixo de sua borda para evitar que a lente, ao flutuar, seja danificada pela tampa do estojo. Seu especialista pode recomendar produtos adicionais ou procedimentos para cuidar de suas lentes com base na química de suas lágrimas e seu horário de uso das lentes. **ADVERTÊNCIAS:** Siga rigorosamente as instruções de seu especialista e todas as instruções de uso deste produto para o uso e conservação corretos de suas lentes de contato, e dos acessórios que se usam para seu cuidado, incluindo o estojo. Se você sentir um desconforto persistente nos olhos, lacrimejamento excessivo, distúrbios na visão ou vermelhidão, retire **IMEDIATAMENTE** as lentes e consulte seu oftalmologista. **PRECAUÇÕES:** Conservar em temperatura ambiente. Evitar calor excessivo. Manter o frasco bem fechado quando não estiver sendo utilizado. Respeitar a data de validade marcada no produto. Manter fora do alcance das crianças. Não usar para desinfecção térmica. Não deixar as lentes imersas em solução de Limpeza. Descartar o restante da solução após quatro meses da abertura do frasco. Para evitar contaminação do produto não tocar a superfície do conta-gotas. Não usar esta solução se for alérgico a qualquer um dos componentes do CLEARLENS Solução Limpadora. As lentes podem ser armazenadas em um estojo fechado por período máximo de 30 dias. Se você precisar armazenar suas lentes por um período mais longo de tempo, limpe-as e desinfete-as com CLEARLENS Solução Limpadora a cada vez que for usá-las, enxaguando e conservando-as em CLEARLENS Solução Conservadora. Importante: Se ocorrer irritação ou lacrimejamento excessivo e estes sintomas persistirem ou se agravarem, ou ainda, se sua visão ficar embaçada, interrompa o uso da solução e procure um especialista. **CONTRAINDICAÇÕES:** Pessoas alérgicas a qualquer um dos componentes de CLEARLENS Solução Limpadora não devem utilizar este produto. **APRESENTAÇÕES:** CLEARLENS Solução Limpadora é esterilizado por filtração e apresentado em frascos plásticos de 15 mL, 30 mL e 60 mL. **PRODUTO ESTÉRIL. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:** O armazenamento e o transporte devem ser feitos à temperatura ambiente, entre 15 e 30 °C. o produto deve ser protegido da luz solar e não deve ser congelado. Prazo de validade: 24 meses após fabricação. Fabricado por: **LEBON PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS LTDA.** Av. Ricardo Leônidas Ribas, 439|Distrito Industrial | CEP 91790-005| Porto Alegre | RS | Responsável Técnico: José Rosito Filho | CRF/RS 713 | Registro ANVISA nº 80256510005 | CNPJ: 87.375.952/0001-78 | INDÚSTRIA BRASILEIRA