



Solução Multiuso para Lentes de Contato

DESCRIÇÃO: CLEARLENS Solução Multiuso tem ação de limpar, desinfetar, enxaguar, lubrificar e conservar as lentes de contato sem irritar os olhos. CLEARLENS Solução Multiuso proporciona um conforto prolongado durante todo o dia, mesmo para os olhos sensíveis. Umidifica as lentes e alivia pequenas irritações e o desconforto durante o uso das lentes. É indicado para desinfetar, limpar, enxaguar, lubrificar e conservar todas as lentes de contato. **COMPOSIÇÃO:** Solução isotônica, tamponada e estéril contendo EDTA, Fosfatos, Cloreto de Sódio, Citrato de sódio, Poloxâmer (tensoativo não iônico), Polissorbato (tensoativo não iônico), Glucam-20, HPMC e PHMB 0,00013% (conservante). **INDICAÇÕES:** CLEARLENS Solução Multiuso é indicada para desinfecção, limpeza diária, remoção de proteínas, lubrificação, enxágue e armazenamento de todas as lentes de contato gelatinosas (hidrofílicas) e silicone hidrogel. **INSTRUÇÕES PARA LIMPAR, DESINFETAR E REMOVER PROTEÍNAS:** **1º passo** - As mãos: Sempre lavar e enxaguar suas mãos antes de manusear suas lentes de contato. **2º passo** - Limpeza e fricção: Acomode a lente na palma da mão. Enxágue completamente os dois lados da lente com CLEARLENS Solução Multiuso, e, com o dedo indicador da outra mão, fricção-a cuidadosamente de maneira linear (para frente e para trás e também para ambos os lados, em forma de cruz). Este procedimento deverá ser efetuado em ambos os lados da lente. Evite tocar a lente com a unha a fim de evitar a possibilidade de rasgos ou danos à mesma. **3º passo** - Enxágue, desinfecção e conservação: Coloque as lentes limpas no estojo e encha-o com CLEARLENS Solução Multiuso. Deixe as lentes imersas durante, no mínimo, quatro (4) horas. A solução utilizada para desinfecção e acondicionamento deverá ser descartada diariamente. Para reutilizar as lentes, retire-as do estojo, repita o 1º passo e coloque-as nos olhos. Não é necessário enxaguá-las antes da utilização. **4º passo** - Cuidados com o estojo: a) Quando utilizar um novo estojo para lentes, enxaguá-lo com CLEARLENS Solução Multiuso antes do usá-lo, para eliminar qualquer resíduo. b) Após o uso, sempre esvaziar o estojo para lentes, e enxaguá-lo com CLEARLENS Solução Multiuso. c) Enxágue bem o estojo a ser utilizado para o armazenamento das lentes com CLEARLENS Solução Multiuso e encha-o com esta solução após completar o enxágue. A cavidade do estojo deve permanecer com solução abaixo de sua borda para evitar que a lente, ao flutuar, seja danificada pela tampa do estojo. Seu especialista pode recomendar produtos adicionais ou procedimentos para cuidar de suas lentes com base na química de suas lágrimas e seu horário de uso das lentes. **ADVERTÊNCIAS:** Siga rigorosamente as instruções de seu especialista e todas as instruções de uso deste produto para o uso e conservação corretos de suas lentes de contato, e dos acessórios que se usam para seu cuidado, incluindo o estojo. Se você sentir um desconforto persistente nos olhos, lacrimejamento excessivo, distúrbios na visão ou vermelhidão, retire IMEDIATAMENTE as lentes e consulte seu oftalmologista. **PRECAUÇÕES:** Conservar em temperatura ambiente. Evitar calor excessivo. Manter o frasco bem fechado quando não estiver sendo utilizado. Respeitar a data de validade marcada no produto. Manter fora do alcance das crianças. Não usar para desinfecção térmica. Descartar o restante da solução após quatro meses da abertura do frasco. Para evitar contaminação do produto não tocar a superfície do conta-gotas. Sempre usar uma solução nova de CLEARLENS Solução Multiuso. Não reutilizar a solução do seu estojo para lentes. Não usar esta solução se for alérgico a qualquer um dos componentes do CLEARLENS Solução Multiuso. As lentes podem ser armazenadas em um estojo fechado por período máximo de 30 dias. Se você precisar armazenar suas lentes por um período mais longo de tempo, limpe-as e desinfete-as com CLEARLENS Solução Multiuso cada vez que for usá-las. Importante: Se ocorrer irritação ou lacrimejamento excessivo e este sintomas persistirem ou se agravarem, ou ainda, se sua visão ficar embaçada, interrompa o uso da solução e procure um especialista. **CONTRAINDICAÇÕES:** Pessoas alérgicas a qualquer um dos componentes de CLEARLENS Solução Multiuso não devem utilizar este produto. **APRESENTAÇÕES:** CLEARLENS Solução Multiuso é esterilizado por filtração e apresentado em frascos plásticos de 60 mL, 120 mL e 300 mL. **PRODUTO ESTÉRIL.** Embalagem com ou sem estojo para lentes. **ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:** O armazenamento e o transporte devem ser feitos à temperatura ambiente, entre 15 e 30 °C. O produto deve ser protegido da luz solar e não deve ser congelado. Prazo de validade: 24 meses após data de fabricação. Fabricado por: **LEBON PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA.** Av. Ricardo Leônidas Ribas, 439 | Distrito Industrial | CEP 91790-005 | Porto Alegre | RS | Responsável Técnico: José Rosito Filho | CRF/RS 713 | Registro ANVISA nº 80256510003 | CNPJ: 87.375.952/0001-78 | INDÚSTRIA BRASILEIRA