
INSTRUÇÕES DE USO

ULTRASEPT RGP

SOLUÇÃO MULTIUSO PARA LENTES DE CONTATO
RGP (Rígida Gás Permeável)

DESCRIÇÃO

A solução multiuso Ultrasept RGP tem ação de limpar, desinfetar, remover acúmulos de proteínas e outros depósitos da superfície, enxaguar e conservar lentes de contato, para uso diário em lentes RGP (Rígida Gás Permeável) e semanal em lentes gelatinosas (hidrofílicas) e de silicone hidrogel. Além disso, elimina micro-organismos prejudiciais da superfície da lente; proporcionando uma limpeza profunda eliminando todos os depósitos da superfície das lentes. UltraSept RGP é compatível com todos os tipos de lentes RGP (Rígida Gás Permeável), gelatinosas (hidrofílicas) e silicone hidrogel. Não contém tiomersal.

COMPOSIÇÃO

Solução isotônica, tamponada e estéril contendo fosfato de sódio dibásico dodecaidratado, fosfato de sódio monobásico monoidratado, cloreto de sódio, edetato dissódico di-hidratado, citrato de sódio, polissorbato 20, poloxâmer 407, cocoamidopropilbetaína, cloridrato de polihexametileno biguanida (PHMB), digliconato de clorexidina, methyl gluceth-20, água purificada. Pode conter hidróxido de sódio e/ou ácido clorídrico q.s.p. pH.

INDICAÇÕES

A solução multiuso Ultrasept RGP é uma solução isotônica, tamponada e estéril, indicada para limpeza profunda, desinfecção e remoção de proteínas e outros depósitos, enxágue e conservação diárias de lentes de contato RGP (Rígidas Gás Permeáveis). Pode ser utilizada para limpeza profunda semanal, desinfecção e remoção de proteínas de lentes de contato gelatinosas (hidrofílicas) e silicone hidrogel.

INSTRUÇÕES PARA LIMPAR, DESINFETAR E REMOVER PROTEÍNAS

1º passo – As mãos:

Sempre lavar com água e sabão e enxaguar suas mãos antes de manusear suas lentes de contato e o frasco de Ultrasept RGP.

2º passo – Limpeza e fricção:

Acomode a lente na palma da mão. Enxágue completamente os dois lados da lente com Ultrasept RGP e, com o dedo indicador da outra mão, friccione-a cuidadosamente de maneira linear (para frente e para trás e também para ambos os lados, em forma de cruz). Este procedimento deverá ser efetuado em ambos os lados da lente. Evite tocar a lente com a unha a fim de evitar a possibilidade de rasgos, quebra ou danos à mesma. Enxaguar a lente com Ultrasept RGP antes de adicioná-la no estojo.

3º passo – Enxágue, desinfecção e conservação:

Coloque as lentes limpas no estojo previamente limpo, sem resíduos, e encha-o com Ultrasept RGP. Deixe as lentes imersas durante, no mínimo, quatro (4) horas. A solução utilizada para desinfecção e acondicionamento deverá ser descartada diariamente. Para reutilizar as lentes, retire-as do estojo, repita o 1º passo e enxágue-as antes de colocá-las nos olhos.

4º passo – Cuidados com o estojo:

- a) Quando utilizar um novo estojo para lentes, enxaguá-lo com Ultrasept RGP antes do uso, para eliminar qualquer resíduo.
- b) Após o uso, sempre esvaziar o estojo para lentes, e enxaguá-lo com Ultrasept RGP.

- c) Enxágue bem o estojo a ser utilizado para o armazenamento das lentes com Ultrasept RGP e encha-o com esta solução após completar o enxágue.
- d) A cavidade do estojo deve permanecer com solução abaixo de sua borda para evitar que a lente, ao flutuar, saia do estojo ou seja danificada pela tampa do mesmo.
- e) Seu especialista pode recomendar produtos adicionais ou procedimentos para cuidar de suas lentes com base na composição química de suas lágrimas e seu programa de uso das lentes.

ADVERTÊNCIAS

Siga rigorosamente as instruções de seu especialista e todas as instruções de uso deste produto para a correta conservação de suas lentes de contato, bem como dos acessórios envolvidos em seu cuidado, incluindo o estojo. Se você sentir um desconforto persistente nos olhos, irritação, ardência, vermelhidão, lacrimejamento excessivo ou distúrbios na visão, descontinue imediatamente o uso da solução, retire as lentes e consulte seu oftalmologista. Os cuidados com as lentes devem ser de acordo com a orientação do médico oftalmologista.

PRECAUÇÕES

- a) Conservar em temperatura ambiente. Evitar calor excessivo.
- b) Para evitar contaminação do produto não tocar a superfície do conta-gotas.
- c) Quando não estiver sendo utilizado, manter o frasco limpo, sem resíduos de produto na parte externa, e bem fechado.
- d) Respeitar a data de validade marcada no produto.
- e) Descartar o restante da solução após 4 meses da abertura do frasco.
- f) Mantenha o produto fora do alcance das crianças.
- g) Não usar para desinfecção térmica.
- h) Sempre utilizar uma solução nova de Ultrasept RGP. Não reutilizar a solução do seu estojo de lentes.
- i) Não usar esta solução se for alérgico a qualquer um dos componentes do Ultrasept RGP. Como qualquer produto para saúde, descontinuar o uso em caso de alergia a quaisquer dos componentes da fórmula.
- j) As lentes podem ser armazenadas em um estojo fechado por período máximo de 30 dias. Se você precisar armazenar suas lentes por um período mais longo de tempo, limpe-as e desinfete-as com Ultrasept RGP a cada vez que for usá-las.

Importante: Se ocorrer qualquer desconforto, irritação, ardência, vermelhidão, lacrimejamento excessivo ou distúrbios na visão, descontinue imediatamente o uso da solução e das lentes e procure seu oftalmologista.

CONTRAINDICAÇÕES

Ultrasept RGP é contraindicado para pacientes que apresentem alergia a qualquer um dos componentes da fórmula. Como qualquer produto para saúde, descontinuar o uso em caso de alergia a quaisquer dos componentes da fórmula.

APRESENTAÇÕES

Ultrasept RGP é esterilizado por filtração e apresentado em frascos plásticos de 120 mL. PRODUTO ESTÉRIL (por filtração).

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

O armazenamento e o transporte devem ser feitos à temperatura ambiente, entre 15 e 30 °C. o produto deve ser protegido da luz solar e não deve ser congelado.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use o produto com prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Após aberto, válido por 4 meses, caso mantido em condições de temperatura, umidade e limpeza adequados.

Características organolépticas do produto: Ultrasept RGP é uma solução límpida, incolor a levemente amarelada.

Antes de usar, observe o aspecto do produto. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Mantenha fora do alcance das crianças.

PRAZO DE VALIDADE

24 meses após data de fabricação.

Após aberto, válido por 4 meses, caso mantido em condições de temperatura, umidade e limpeza adequados.

PRODUTO ESTÉRIL (por filtração)

NÃO USAR SE A EMBALAGEM ESTIVER ROMPIDA OU DESTAMPADA

Fabricado por:

LEBON PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA.

Av. Ricardo Leônidas Ribas, 439 | Distrito Industrial

Porto Alegre | RS | Brasil | CEP 91790-005

CNPJ: 87.375.952/0001-78

Fone/Fax: +55 51 3250.8256

E-mail: lebon@laboratoriolebon.com.br

Site: www.laboratoriolebon.com.br

Responsável Técnica: Patrícia Schütz Bittencourt

CRF/RS 14228

Registro ANVISA/MS: 80256510012

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Distribuição e Comercialização:

KLEY HERTZ FARMACÊUTICA S.A.

Rua Comendador Azevedo, 224

Bairro Floresta | Porto Alegre | RS

CEP 90220-150 | Brasil

CNPJ: 92.695.691/0001-03

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor

0800 642 9109

sac@laboratoriolebon.com.br