

INSTRUÇÕES DE USO

CLEARLENS SOLUÇÃO LIMPADORA
Solução Limpadora para Lentes de Contato

DESCRIÇÃO

Clearlens Solução Limpadora tem ação de limpar, desinfetar, remover acúmulos de proteínas e outros depósitos da superfície das lentes gelatinosas, silicone hidrogel e rígidas gás permeáveis. Elimina micro-organismos prejudiciais da superfície da lente.

Proporciona uma limpeza profunda eliminando todos os depósitos da superfície das lentes Para todos os tipos de lentes RGP (rígida gás permeável), gelatinosas (hidrofílicas) e silicone hidrogel.

Não contém tiomersal.

COMPOSIÇÃO

Solução isotônica, tamponada e estéril contendo EDTA, Fosfatos, Cloreto de Sódio, Citrato, Poloxamina (tensoativo não iônico), Polissorbato (tensoativo não iônico), Anfocam (tensoativo não iônico), Glucam E-20, PHMB 0,0005% (conservante) e Digliconato de Clorexidina 0,0003% (conservante).

INDICAÇÕES

Clearlens Solução Limpadora é indicada para limpeza profunda semanal das lentes hidrofílicas (gelatinosas) e diária das lentes de contato RGP (Rígidas Gás Permeáveis).

Indicada para desinfecção, remoção de proteínas de todas as lentes de contato rígida gás permeáveis, gelatinosas (hidrofílicas) e silicone hidrogel.

INSTRUÇÕES PARA LIMPAR, DESINFETAR E REMOVER PROTEÍNAS:

1º passo - As mãos:

Sempre lavar e enxaguar suas mãos antes de manusear suas lentes de contato.

2º passo - Limpeza e fricção:

Acomode a lente na palma da mão.

Enxágue completamente os dois lados da lente com Clearlens Solução Limpadora, e com o dedo indicador da outra mão, fricção-a cuidadosamente de maneira linear (para frente e para trás e também para ambos os lados, em forma de cruz). Este procedimento deverá ser efetuado em ambos os lados da lente. Enxágue bem a lente de contato. Evite tocar a lente com a unha a fim de evitar possibilidade de rasgos.

3º passo - Enxágue, desinfecção e conservação:

Enxágue completamente os dois lados da lente com Clearlens Solução Conservadora, Registro ANVISA nº 80256510004 ou Clearlens Solução Multiuso, Registro ANVISA nº 80256510003. Coloque as lentes limpas no estojo e encha-o com Clearlens Solução Conservadora, Registro ANVISA nº 80256510004 ou Clearlens Solução Multiuso, Registro ANVISA nº 80256510003. Deixe as lentes imersas durante, no mínimo, quatro (4) horas na solução escolhida.

A solução utilizada para acondicionamento deverá ser descartada diariamente. Para reutilizar as lentes, retire-as do estojo, repita o 1º passo e coloque-as nos olhos. Não é necessário enxaguar-las antes da utilização.

4º passo - Cuidados com o estojo:

- a) Quando utilizar um novo estojo para lentes, enxaguá-lo com Clearlens Solução Conservadora, Registro ANVISA nº 80256510004 ou Clearlens Solução Multiuso, Registro ANVISA nº 80256510003 antes de usar, para eliminar qualquer resíduo.
- b) Após o uso, sempre esvaziar o estojo para lentes, enxaguá-lo com Clearlens Solução Conservadora, Registro ANVISA nº 80256510004 ou Clearlens Solução Multiuso, Registro ANVISA nº 80256510003.
- c) Enxágue bem o estojo a ser utilizado para o armazenamento das lentes com Clearlens Solução Conservadora, Registro ANVISA nº 80256510004 ou Clearlens Solução Multiuso, Registro ANVISA nº 80256510003 e encha-o com esta solução após completar o enxágue.

A cavidade do estojo deve permanecer com solução abaixo de sua borda para evitar que a lente, ao flutuar, seja danificada pela tampa do estojo.

Seu especialista pode recomendar produtos adicionais ou procedimentos para cuidar de suas lentes com base na química de suas lágrimas e seu horário de uso das lentes.

ADVERTÊNCIAS

Siga rigorosamente as instruções de seu especialista e todas as instruções de uso deste produto para o uso e conservação corretos de suas lentes de contato, e dos acessórios que se usam para seu cuidado, incluindo o estojo. Se você sentir um desconforto persistente nos olhos, lacrimejamento excessivo, distúrbios na visão ou vermelhidão, retire **IMEDIATAMENTE** as lentes e consulte seu oftalmologista.

PRECAUÇÕES

Conservar em temperatura ambiente. Evitar calor excessivo.

Manter o frasco bem fechado quando não estiver sendo utilizado.

Respeitar a data de validade marcada no produto.

Manter fora do alcance das crianças.

Não usar para desinfecção térmica.

Não deixar as lentes imersas em solução de Limpeza.

Não usar as lentes sem enxaguar com a solução Clearlens Solução Conservadora, Registro ANVISA nº 80256510004 ou Clearlens Solução Multiuso, Registro ANVISA nº 80256510003.

Descartar o restante da solução após quatro meses da abertura do frasco.

Para evitar contaminação do produto não tocar a superfície do conta-gotas.

Não usar esta solução se for alérgico a qualquer um dos componentes do Clearlens Solução Limpadora.

Importante: Se ocorrer irritação ou lacrimejamento excessivo e estes sintomas persistirem ou se agravarem, ou ainda, se sua visão ficar embaçada, interrompa o uso da solução e procure um especialista.

CONTRAINDICAÇÕES

Pessoas alérgicas a qualquer um dos componentes de Clearlens Solução Limpadora não devem utilizar este produto.

APRESENTAÇÕES

Clearlens Solução Limpadora é esterilizado por filtração e apresentado em frascos plásticos de 15 mL, 30 mL e 60 mL (ESTÉRIL).

Embalagem com ou sem estojo para lentes.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

O armazenamento e o transporte devem ser feitos à temperatura ambiente, entre 15 e 30 °C. O produto deve ser protegido da luz solar e não deve ser congelado.

Prazo de validade: 24 meses.

Fabricado por:

LEBON PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA.

Av. Ricardo Leônidas Ribas, 439 | Distrito Industrial

Porto Alegre | RS | CEP 91790-005

E-mail: lebon@laboratoriolebon.com.br

Fone/Fax: (51) 3250 8256

CNPJ: 87.375.952/0001-78

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Responsável Técnica: Patrícia Schütz Bittencourt – CRF/RS 14228

Registro Anvisa N°: 80256510005

Serviço de Atendimento ao Consumidor

0800 642 9109

sac@laboratoriolebon.com.br